

# Lit latéroverticalisateur ORTHINEA

Le lit latéro-verticalisateur d'Orthinea permet, en position couchée, de modifier les points de pression et facilite le changement de position.

À ses fonctionnalités de latéralisation en position couchée, le lit latéro-verticalisateur Orthinea associe les fonctions d'un lit médicalisé très complet : verticalisation, plicatures (possibilité de relever les jambes, la tête...), lift (réglage de la hauteur du lit), barrières de sécurité...

Aide technique au positionnement couché ISO 18.12.10

# **MOUVEMENTS FACILITÉS**

Le dispositif s'adresse aux personnes souhaitant moduler leurs points de pression au cours de la nuit. Pour les utilisateurs ayant une force musculaire suffisante, le changement de position est facilité.

## **MATÉRIAUX**

Châssis en acier, barrières et repose-pieds de verticalisation en bois et amovibles, télécommandes en plastique et 4 doubles-roulettes avec freins, font de ce lit une aide technique robuste.

# COMPATIBILITE

Le lit latéro-verticalisateur Orthinea est compatible avec tous types de matelas anti-escarre à air ou à mousse.







Garantie: 2 ans Dimensions du couchage:

Largeur: 100, 110, 120 cm

ou sur-mesure

Longueur : de 180 à 240 cm

ou sur-mesure

Dimensions du cadre de lit :

125 x 220 cm, ou sur-mesure Hauteur verticalisé : 230 cm (peut être réduite en option)

Poids du lit: 145 kg

Poids de l'utilisateur : de 135 à 185 kg

Énergie: 220 V Matériaux:

Châssis: acier

Barrières et repose-pieds de

verticalisation: bois

Télécommandes : plastique

**Volume sonore du lit** : les vérins Linak<sup>™</sup> allient puissance et faible niveau sonore

Homologation du système : CE

Fabricant : Richter Freund &

Hacker GBR

Pays de fabrication : Allemagne

#### Fournisseur français:

Orthinea 102 route de Versailles 91160 Champlan 01 69 07 61 13 Info@orthinea.com

Tarif TTC: 13 590€TTC

Remboursement de la Sécurité

**Sociale :** 382,19 - 588,76 € Codes LPP : 1266846, 1238152,

1211489, 1207507

Location: non

Essais: possibles selon critères

Lien:

http://www.orthinea.com/Pages/Lits\_verticalisateur.html

### Rédaction :

Cellule Innovation AFM-Téléthon
• téléphone : 01 69 13 21 06
• celluleinnovation@afm-telethon.fr

# Fonctionnement du lit latéro-verticalisateur Orthinea

Par un système de vérins, le lit atteint en quelques secondes une **latéralisation de 25°** et, en quelques minutes, une **verticalisation de 85°**.

La hauteur du lit est réglable entre 40 et 80 cm.

Deux plicatures électriques permettent de surélever le buste et les genoux.



Lors de la latéralisation, l'un des côtés se lève tandis que l'autre s'oppose légèrement pour caler et sécuriser l'utilisateur.



Le dispositif est doté de **3 télécommandes filaires** qui contrôlent les trois grandes fonctions du lit : les plicatures (buste et genoux), la latéralisation et la verticalisation. En **option**, le lit se rend **compatible avec tous les systèmes de contrôle** d'environnement, contacteur et autres commandes infra-rouges.

Il n'est pas possible d'utiliser deux fonctions en même temps. Par exemple, les plicatures ne peuvent pas être actionnées lors de la latéralisation ou de la verticalisation. La programmation des cycles de positions n'est pas prévue.

Pour éviter les chutes, 3 sangles de maintien amovibles sont proposées avec le dispositif. Le modèle ne présente **ni système d'alarme** pour alerter en cas de dysfonctionnement éventuel, **ni système d'appel-malade**.

## Différents modèles du lit latéro-verticalisateur Orthinea

- Le lit latéro-verticalisateur d'Orthinea est prévu pour être utilisé par des personnes pesant jusqu'à 185 kg.
- Il n'y a pas de versions bariatrique, pédiatriques ou pour couple pour ce modèle.

Taille du couchage, configuration et coloris : tout est personnalisable.



Association reconnue d'utilité publique

1, rue de l'internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16 Siège sodal : AFM - Institut de Myologie 47 - 83, boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13 www.afm-talethon.fr